

Aluminium Teleskop-Gehstock



mit LED-Licht und Alarm

für mehr Sicherheit unterwegs!

Art.-Nr.: 70520

Maße: ca. 15.4 cm x 3.8 cm x 74,5cm ; 97 cm (ausgezogen)

Gewicht: 325g

Dieser höhenverstellbare Gehstock ist mit einem integrierten Li-Ionen Akku ausgestattet und verfügt über ein verstellbares LED-Frontlicht zum Ausleuchten des Gehweges, ein rotes LED-Blinklicht und eine akustische Alarmfunktion. Somit trägt der Gehstock erheblich zur Sicherheit auf Schritt und Tritt bei. Der Akku kann schnell und einfach über das mitgelieferte USB-Ladekabel an einer USB-Buchse geladen werden. Ein passendes Netzteil mit USB-Buchse ist optional erhältlich.

Funktionen:

1. LED-Frontlicht (4 weiße LED's)
2. Einstellbarer Leuchtwinkel 45 Grad
2. LED-Licht (2 rote LED's mit Blinkfunktion)
3. Li-Ion Akku 500 mAh - aufladbar über mitgeliefertes 5 V USB-Ladekabel oder passendes Netzteil (optional)
4. Aluminium eloxierter Teleskop-Stock (höhenverstellbar)
5. Akustische Alarmfunktion
6. Handgelenkschlaufe (ca. 20 cm)

Technische Daten:

- Li-Ion Akku 3,7 V / 500mAh
- Eingangsstrom: 5.0 - 5.3 V
- Leuchtzeit bei vollem Akku: ca. 12Std.
- Ladezeit: ca. 3 St.
- 4 weiße LED's, max. 15 Lumen
- 2 rote LED's, max. 3 Lumen
- Verstellbare Höhe: 10 Stufen 74,5 cm - 97 cm
- Alarm-Signal: 100 dB

Anwendung:

Höhenverstellung

10 Stufen: 74,5 cm – 97 cm

Aluminium-Knopf am Teleskop-Stock eindrücken, Stock auf die gewünschte Länge ausziehen oder senken und an der entsprechenden Stelle einrasten lassen.

Schalter-Positionen

1. Weiße LED
2. Weiße LED + Rote LED blinkt
3. AUS
4. Rote LED blinkt + Alarm

Ladevorgang

USB-Ladekabel in den DC 5V Anschluss stecken und an einem USB-Port z.B. PC, Powerbank oder externen Netzteil anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED für den Akku-Ladestatus rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Leuchte.

Hiermit erklärt arcotec Mobilfunktechnik GmbH, dass sich der LED Teleskop-Gehstock in Übereinstimmung mit der EMC Richtlinie 2004/108/EC befindet. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetadresse www.arcotec.de abgerufen werden.

WARNHINWEISE:

- (1) Nicht direkt ins Auge keuchten
- (2) Übermäßige Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen
- (3) Die Alarmfunktion ausschließlich in Notfällen auslösen. Lauter Signalton kann ältere Personen und kleine Kinder/Säuglinge erschrecken bzw. in unmittelbarer Nähe zu Hörschädigungen führen.
- (4) Den Gehstock nicht ins Wasser tauchen.
- (5) Beschädigungen, Schläge oder Stürze auf den Griff möglichst vermeiden. Dies kann die Elektronik und/oder die LED's bzw. den Alarm im Inneren beschädigen und zum Funktionsausfall führen.